

粪便Hp耐药基因检测

以治疗为导向，提高首诊根除率



幽门螺杆菌 (Hp) 是胃癌 I 类致癌因子!

没有任何症状，也可能存在幽门螺杆菌感染!

70%的感染者是无症状的，幽门螺杆菌会通过共餐等途径进行传播。

经常肠胃不舒服?
幽门螺杆菌在作祟!

幽门螺杆菌会导致慢性胃炎、消化不良和消化性溃疡等。

哪些人群需要进行幽门螺杆菌的根除?

无抗衡因素的情况下，证实感染了幽门螺杆菌的人群均应根除。

为什么幽门螺杆菌感染反复治不好?

- Hp基因突变对某些抗生素产生耐药，吃了药也不管用；
- 经验性治疗和抗生素滥用；

根源在于耐药，通过耐药基因检测可解决幽门螺杆菌无法根除的问题。

粪便Hp耐药基因检测具有显著优势

粪便Hp耐药基因检测		细菌培养与药敏试验
是否侵入身体	非侵入	侵入
样本类型	粪便 (5g, 大拇指第一关节大小的粪便)	胃粘膜组织
取样地点	卫生间	医院内镜检查室
样本转运	快递上门(包邮)或自行送至医院	需医院转运
等待时间	随到随检	胃镜预约1周-3个月
前往医院次数	0-2次	4-5次, 检查程序复杂
检测成功率	高, 90%以上	低, 50%-60%
适用人群	所有Hp阳性者, 包括Hp根除失败者、不接受或不适合做胃镜者、无法多次往返医院者	接受并可进行胃镜检查者

临床常用的五种抗生素均可检测




检测流程(一): 受检者居家采样, 自行邮寄

01 取样前准备



用微信扫描《说明书》上的二维码, 进入小程序→选择检测项目, 录入个人信息并提交→击观看采样视频。

02 采集粪便样本

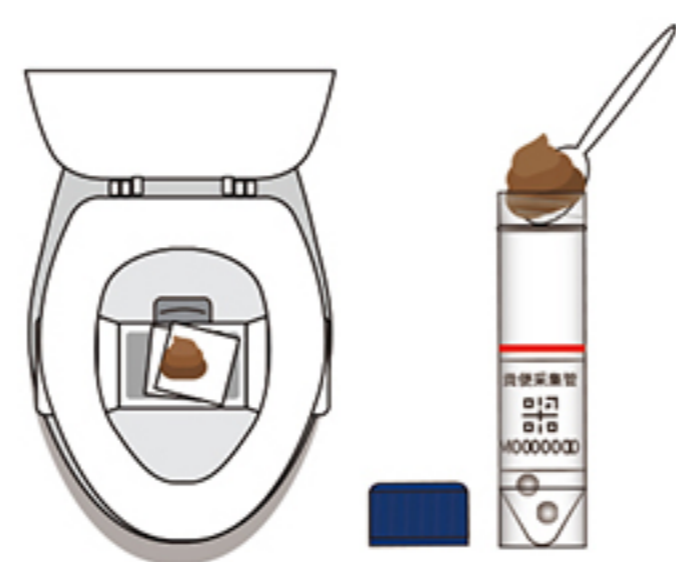


取样: 采取坐便或蹲便的方式, 用取样勺取大拇指第一关节大小的粪便, 拧紧管盖, 30秒摇匀。

03 回寄样本



将采样管装入生物袋→进入小程序, 点击“样本寄回”, 选择样本回寄方式(全国包邮)→进入小程序, 点击“我的报告”可查看及下载报告(收到样本后5个工作日)。

检测流程(二): 受检者在医院或居家采样, 将样本交给医务人员

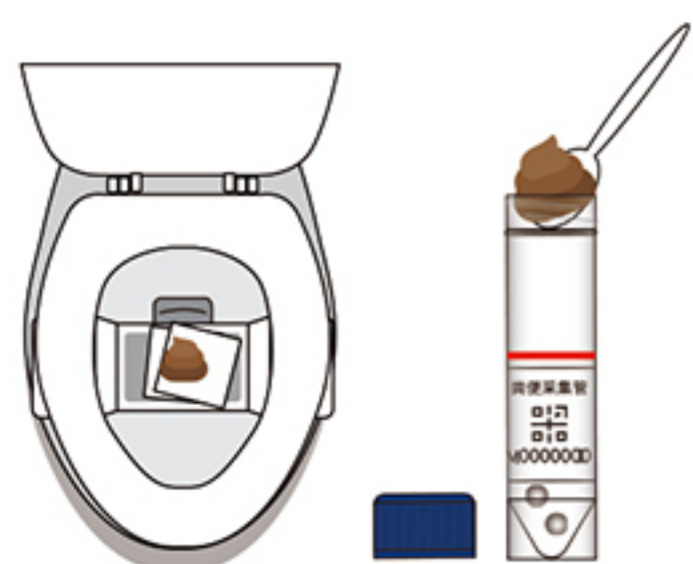

01 采集粪便样本

取样: 采取坐便或蹲便的方式, 用取样勺取大拇指第一关节大小的粪便, 拧紧管盖, 30秒摇匀。



02 将样本交给医务人员

采集完样本后, 将样本交给医务人员, 复诊时领取检查报告。